

新鋭工業
超音波式ネブライザー
コンフォートオアシス KU-200

【在宅】 ネブライザー療法

＊簡易的な説明のため
詳細は取扱説明書と
ともにご利用ください。

①吸入前準備



本体に水道水を入れます

水道水は作用槽の
水位線(約200ml)まで入れます

水道水は毎回新しいものを入
れ替え使用してください

②薬液の準備



少量霧化キャップセット

カップホルダーを取り付け
薬液を入れます

少量霧化キャップセットを霧化
室に設置して使用してください

薬液
生理食塩液20mlと
各ネブライザー用薬液

③送気ホースを取り付ける




霧化室と本体を送気ホースで
つなげる

ホースのたわみに気を付けて
ください（詳細は取扱説明書）

＊霧化室には必ず空気孔を
数箇所準備ください

④噴霧開始

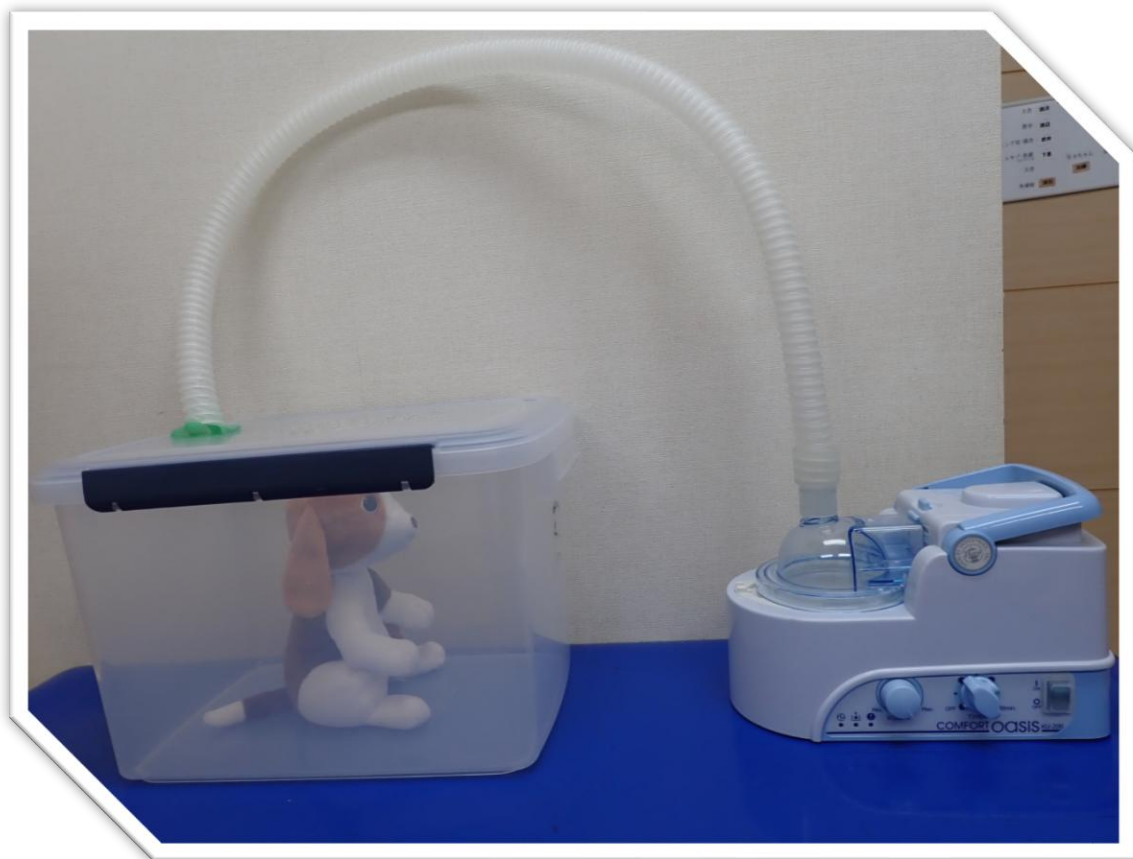

吸入時間(Timer) 約15分
霧化量(Volume) 中
に調節し噴霧を開始

直接噴霧する場合
霧化量をMin～中に調節して
下さい。


⑤お手入れ

耐熱送気ホース、霧化室、薬液カップ、カップホルダーは
毎回使用後に消毒乾燥してください

- ① 水洗い：水道水でよく洗い流します
- ② 消毒：次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン)に1時間以上漬ける
＊ミルトンのホームページをご参照ください
- ③ 乾燥：自然乾燥または食器乾燥機を利用

薬液が付着したまま放置するとカビや雑菌が繁殖しますので
ご注意下さい

⑤お手入れ

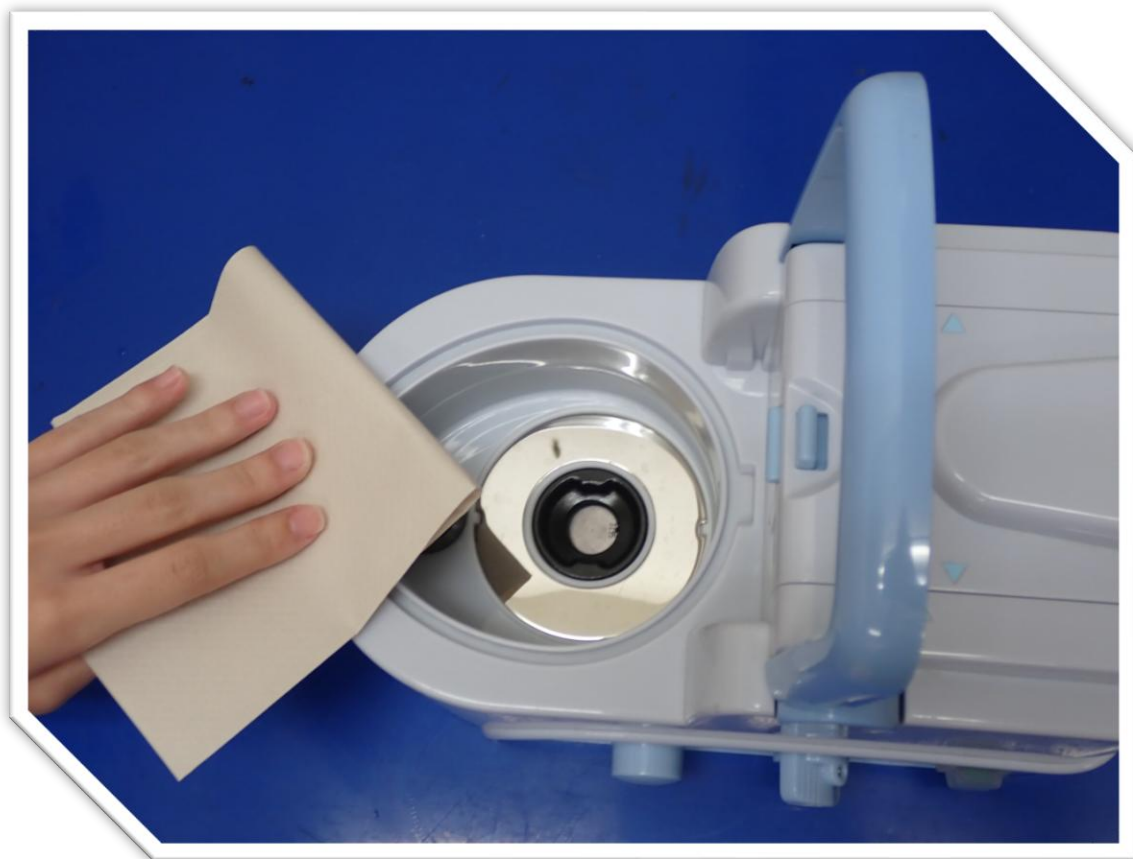

作用槽内の水道水は廃棄し
キッチンペーパーなどでよく
水分を取ってください

定期的な洗浄消毒は
取扱説明書をご参照ください